

外挿式バイトブロック

ストリームガード

ストリームガード・ラウンドS/SS

1



気管チューブをつまみ、ストリームガードの端を角度をつけてかませます。

2



気管チューブ先端の位置が変わらないように注意しながら、ストリームガードを口方向に滑らせながら装着します。

3



セーフティーフックにテープを掛け、2周以上巻いて気管チューブとストリームガードをしっかりと固定します。

4



患者様へテープを固定する場合は上図の位置にテープを巻いて固定します。

- 本品は未滅菌品です。消毒には次亜塩素酸系、アルコール系消毒薬をご使用ください。
- 適合サイズはインフレーションラインをストリームガード本体内に収めない場合のもので、インフレーションラインを本体内に収める場合は、気管チューブ内径に1mm加えたサイズに適合した規格をご使用ください。
- ストリームガード装着後、気管チューブの機能に問題がないことを常に確認・観察してください。



ストリームガード・ラウンドS

品番：1305
仕様：外挿式バイトブロック(円形断面)/未滅菌個装
適合サイズ：気管チューブID=5.5~6.5
包装：20個入
JANコード：4580320710118
製造国：日本



ストリームガード・ラウンドSS

品番：1306
仕様：外挿式バイトブロック(円形断面)/未滅菌個装
適合サイズ：気管チューブID=4.0~5.0
包装：20個入
JANコード：4580320710125
製造国：日本

※気管チューブ外径がメーカーにより若干異なるため、適合サイズは目安となります。気管チューブが正常に機能していることを確認の上、ご使用ください。

CureCare

製造販売元
株式会社キュアケア

大阪府池田市鉢塚2-5-26 LOFT10 2階 TEL:072-741-7755
<http://www.curecare.co.jp>